


PGA-2

歯科鑄造用金合金 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00002000
販売名:ピージーエー2(PGA-2)

床、クラスプに必要な硬さとバネ性、
操作性を兼ね備えた金色の鑄造用白金加金合金

- 用途：鑄造床（バー、クラスプ）など
- 液相点：985℃
- 硬さ：軟化185HV、硬化300HV
- 色調：金色
- 質量：5g
- 熱処理方法：軟化処理/800℃で10分保持した後、水中急冷
硬化処理/軟化処理後350℃で20分保持した後、大気放冷

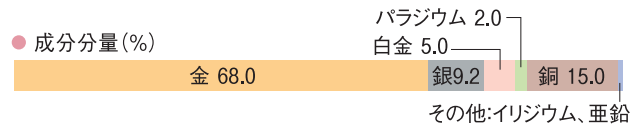

PGA-3

歯科鑄造用金合金 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00003000
販売名:ピージーエー3(PGA-3)

スリークウォータークラウンやミリングなどの症例に
適した硬さと操作性を兼ね備えた金色の白金加金合金

- 用途：鑄造床（バー、クラスプ）など
- 液相点：955℃
- 硬さ：軟化185HV、硬化300HV
- 色調：金色
- 質量：5g
- 熱処理方法：軟化処理/800℃で10分保持した後、水中急冷
硬化処理/軟化処理後350℃で20分保持した後、大気放冷




PGA-12

歯科非鑄造用金合金 管理医療機器（クラスII）認証番号:15000BZZ01150000
販売名:PGA-12

クラスプに適した硬さとバネ性を
兼ね備えた金色の白金加金合金ワイヤー

- 用途：クラスプ
- 液相点：920℃
- 硬さ：硬化320HV
- 色調：金色
- 質量：5g
- 線径種類：ワイヤー（φ0.9mm、φ1.0mm、φ1.1mm）
- 熱処理方法：軟化処理/800℃で10分保持した後、水中急冷
硬化処理/軟化処理後400℃で20分保持した後、大気放冷

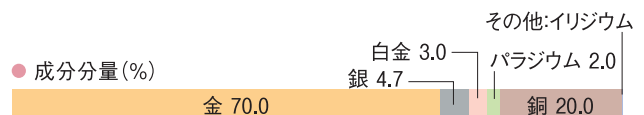


PGA-13

歯科鑄造用金合金 管理医療機器（クラスII）認証番号:220ALBZX00004000
販売名:ピージーエー13(PGA-13)

PGA-12と同成分で、
床、バー、クラスプに適した鑄造用白金加金合金

- 用途：鑄造床（バー、クラスプ）など
- 液相点：970℃
- 硬さ：軟化195HV、硬化315HV
- 色調：金色
- 質量：5g
- 熱処理方法：軟化処理/750℃で10分保持した後、水中急冷
硬化処理/軟化処理後350℃で20分保持した後、大気放冷

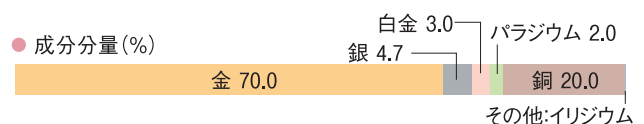


PGA-21

歯科鑄造用金合金 管理医療機器（クラスII） 認証番号:220ALBZX00005000
販売名:ピージーエー21 (PGA-21)

クラウンブリッジに必要な特性を兼ね備えた 金色の強い白金加金合金

- 用途：アンレー、クラウン、ブリッジなど
- 液相点：1,000℃
- 硬さ：軟化135HV
- 色調：金色
- 質量：5g
- 熱処理方法：軟化処理/800℃で10分保持した後、水中急冷

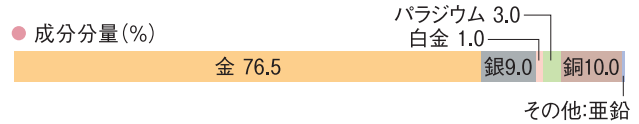

PGA-55

歯科鑄造用低カラット金合金 管理医療機器（クラスII） 認証番号:15300BZZ01141000
販売名:ピージーエー55

中カラットの淡黄色白金加金合金

- 用途：クラウン、ブリッジ、鑄造床（バー、クラスプ）など
- 液相点：870℃
- 硬さ：硬化245HV
- 色調：淡黄色
- 質量：10g
- 熱処理方法：軟化処理/750℃で10分保持した後、水中急冷
硬化処理/軟化処理後400℃で20分保持した後、大気放冷
- 注意点：熔融温度が他の白金加金合金よりやや低いため、
リング温度を500～600℃に下げってから鑄造してください。




PGA-73PZ

歯科鑄造用低カラット金合金 管理医療機器（クラスII） 認証番号:224ALBZX00002000
販売名:ピージーエー73ピース（PGA-73PZ）

パラジウムフリーで美しい黄金色を保ち 幅広い用途に使用可能な白金加金合金

- 用途：クラウン、ブリッジ、鑄造床（バー、クラスプ）など
- 液相点：900℃
- 硬さ：硬化290HV
- 色調：金色
- 質量：10g
- 熱処理方法：軟化処理/650℃で10分保持した後、水中急冷
硬化処理/軟化処理後300℃で20分保持した後、大気放冷


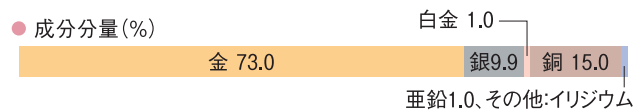


キャスティングゴールド タイプⅢ

歯科鑄造用金合金 管理医療機器（クラスⅡ）認証番号:220ALBZX00010000
販売名:イシフク キャスティングゴールドタイプⅢ

金色で硬質の金合金

- 用途：アンレー、クラウン、ブリッジなど
- 液相点：990℃
- 硬さ：軟化155HV
- 色調：金色
- 質量：10g
- 熱処理方法：軟化处理/800℃で10分保持した後、水中急冷

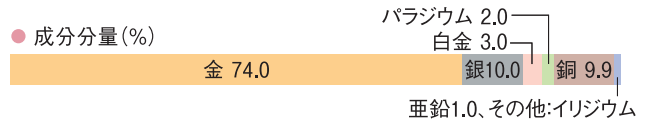
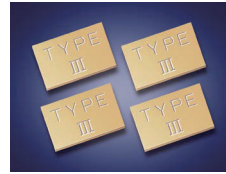


キャスティングゴールド タイプⅣ

歯科鑄造用金合金 管理医療機器（クラスⅡ）認証番号:220ALBZX00011000
販売名:イシフク キャスティングゴールドタイプⅣ

金色で超硬質の金合金

- 用途：鑄造床（バー、クラスプ）など
- 液相点：980℃
- 硬さ：硬化285HV
- 色調：金色
- 質量：10g
- 熱処理方法：軟化处理/800℃で10分保持した後、水中急冷
硬化処理/軟化处理後400℃で20分保持した後、大気放冷

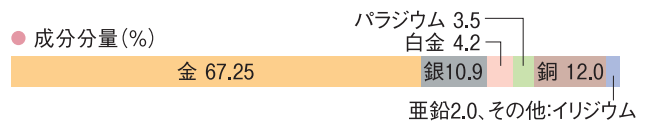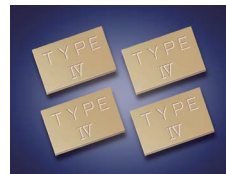

歯科用純金板

歯科用純金板24K [純金]

歯科用金地金 管理医療機器（クラスⅡ）認証番号:15400BZZ01199000
販売名:歯科用純金板24K

ロンドン金市場公認溶解・検定業者である
当社が提供する高品位の歯科用純金板

- 液相点：1,063℃
- 色調：金色
- 質量：5g

